

入浴用踏台 取扱説明書

- ◆本商品をお買い上げ頂きまして、誠にありがとうございます。
- ◆ご使用になる前に必ずこの説明書をお読み頂き、いつでも見られる場所に大切に保管して下さい。
- ◆ご不明な点がございましたら製造元までお問い合わせ下さい。
- ◆不適切な使用により事故が発生した場合、当社は責任を負いかねますので、あらかじめご了承下さい。

**用途：入浴時の踏台、入浴中はイスとして使用していただくための製品です
それ以外の目的の使用はおやめください**



※吸盤はオプションです

- 【タイプ】** 座面穴なし・座面穴あき
【サイズ】 S: 25cm × 35cm × 高さ
高さ 15・20・25・30cm
L: 25cm × 45cm × 高さ
高さ 15・20・25・30cm
【材質】 本体/ステンレスSUS304
座面/ウレタンマット
【重量】 1.8～2.3kg

①使用上の注意

誤った使い方をすると

「障害または財産への損害が発生する可能性が想定される」内容を説明しています

脚ゴムをご使用の場合

- 平らで安定した場所に置いてご使用下さい。
- 浴槽の中でご使用の場合、座面の裏側に空気がたまって不安定になる場合がありますので、たまった空気を追い出してからご使用下さい。
- 踏台で使用する時に石鹸などですべる場合がありますのでご注意下さい。
- ご使用前、ご使用後は床や浴槽台についた石鹸やシャンプーを洗い流して下さい。
- 転倒してケガをするおそれがあるため、人が座った状態で本体を移動させたり引きずったりしないで下さい。
- 本体が劣化し破損するおそれがあるため、本体が浴室内にある状態で浴室乾燥機を使用しないで下さい。
- 使用者が、自分の身体を安定させられない場合は使用しないで下さい。
- 使用前に脚ゴムの劣化など各部に異常がないか点検をして下さい。
- 脚ゴムは消耗品のため、劣化した場合は使用を止め、お買い求めになられた販売店に交換を依頼して下さい。
- 取り付け方など、ご使用前に不安がある場合はお買い求めになられた販売店に相談して下さい。



必ず
守る

吸盤付きをご使用の場合

- ご使用前に必ず点検し、4つの脚先の吸盤を下方に加圧し、前方に押し続けて固定した後4箇所の吸盤が確実に設置していることを確認してからご使用下さい。
- 平らで安定した場所に置き、4つの脚先の吸盤を下方に加圧し、前方に押し続けて固定した後4箇所の吸盤が確実に設置していることを確認してからご使用下さい。
- 浴槽の中でご使用の場合、座面の裏側に空気がたまって不安定になる場合がありますので、たまった空気を追い出してからご使用下さい。
- 踏台で使用する時に石鹸などですべる場合がありますのでご注意下さい。
- ご使用前、ご使用後は床や浴槽台についた石鹸やシャンプーを洗い流して下さい。
- 使用者が、自分の身体を安定させられない場合は使用しないで下さい。
- 使用前に吸盤の劣化など各部に異常がないか点検をして下さい。
- 吸盤は消耗品のため、劣化した場合は使用を止め、お買い求めになられた販売店に交換を依頼して下さい。
- 取り付け方など、ご使用前に不安がある場合はお買い求めになられた販売店に相談して下さい。
- 凹凸のあるタイルや、小さい小石のようなタイルが埋め込まれた洗い場、浴槽では使用しないで下さい。



必ず
守る

※吸盤と床面が確実に付いていることを確認の上、ご使用下さい。

※吸盤がしっかり固定されないままですと、大変危険です。ご使用をお止め下さい。

禁止事項

誤った使い方をする
「死亡または重傷などを負う可能性が想定される」内容を説明しています。

脚ゴムをご使用の場合


- マットや、すのこ等の上では使用しないで下さい。
本体がガタつき転倒しケガをするおそれがあります。
- 浴室以外で使用しないで下さい。
転倒してケガをするおそれがあります。
- 荷重100kgを越える使用はお避け下さい。
本体が破損し、ケガをするおそれがあります。
- 横方向に強い力をかけないで下さい。
本体が移動し、転倒してケガをするおそれがあります。
- 2人以上同時に座らないで下さい。
転倒してケガをするおそれがあります。
- 浴室内で使用する浴槽台以外の用途で使用しないで下さい。
子供の遊び道具や荷物置き場として使用すると破損やケガのおそれがあります。
- 焚き口や、浴槽内の給水口、給湯口、蛇口等高温の場所に近づけないで下さい。
本体が破損したりステンレスの高温によるやけどの原因になります。
- 排水溝のフタの上に脚ゴムや吸盤を置かないで下さい。
本体がガタつき転倒しケガをするおそれがあります。
- 座面の上に飛び乗ったり、座面の端の方に座ったりしないで下さい。
座面のフチに座るなど座面の中央以外に座ると、本体が破損したり転倒してケガをするおそれがあります。



禁止事項

吸盤付きをご使用の場合

- 凹凸のあるタイルや小さな小石が埋め込まれた洗い場、浴槽では使用しないで下さい。
本体がガタつき転倒しケガをするおそれがあります。
- マットや、すのこ等の上では使用しないで下さい。
本体がガタつき転倒しケガをするおそれがあります。
- 浴室以外で使用しないで下さい。
転倒してケガをするおそれがあります。
- 荷重100kgを越える使用はお避け下さい。
本体が破損し、ケガをするおそれがあります。
- 横方向に強い力をかけないで下さい。
本体が移動し、転倒してケガをするおそれがあります。
- 2人以上同時に座らないで下さい。
転倒してケガをするおそれがあります。
- 浴室内で使用する浴槽台以外の用途で使用しないで下さい。
子供の遊び道具や荷物置き場として使用すると破損やケガのおそれがあります。
- 焚き口等高温の場所に近づけないで下さい。
本体が破損したりステンレスの高温によるやけどの原因になります。
- 浴槽内の給水口、給湯口、蛇口の近くで使用しないで下さい。
やけどの原因となったり、止水栓の鎖や蛇口が邪魔になり大変危険です。
- 排水溝のフタの上に脚ゴムや吸盤を置かないで下さい。
本体がガタつき転倒しケガをするおそれがあります。
- 座面の上に飛び乗ったり、座面の端の方に座ったりしないで下さい。
座面のフチに座るなど座面の中央以外に座ると、本体が破損したり転倒してケガをするおそれがあります。

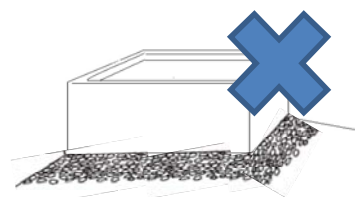

禁止事項

※吸盤と床面が確実についていない場合は、ご使用をお止め下さい。
※吸盤がしっかり固定されないままですと、大変危険ですのでご使用をお止め下さい。



【製造元】

株式会社トマト 本書式は予告なく変更する場合があります

静岡県静岡市清水区渋川1丁目6-20

TEL 054-349-2180 FAX 054-349-2182