

オーラルバイト使用上の注意

- **本品は1人の患者さんに使い切りでご使用下さい。**他の患者さんとの併用はお避け下さい。
繰返しご使用になる場合は、熱湯消毒か、プラスチック食器と同様に洗浄して頂き、必ず次のご使用前に本品の状態を確認し、適宜交換してください。
- **前歯で噛ませないようにしてください。**本品は硬質のポリウレタン製で歯や粘膜に負担がかかりにくい材質ですが、意識障害等ある患者さんにご使用になる際は、歯が折れたりしないよう、十分にご注意下さい。

輸入販売元：ザイコア・インターナショナル・インク

〒160-0022 東京都新宿区新宿6-7-22 エルプリメント新宿 4F ☎ 03-6457-8379 ✉ info@ziecor.com

オーラルバイト使用方法



1. 本品を横にして
口腔内に挿入する。



2. 口内で縦にして、
奥歯を凹凸部に噛ま
せるように装着する。



3. 本品を装着した
反対側の部位を
清掃する。



4. 患者さんの口が開きにくい
場合、本品にジャム等の
甘いものをつけて開口を
促す方法も有効です。



厚み：
ワイド 約15mm
スリム 約10mm

Ziecor International, Inc.