

タマツのつながる手すりシリーズ
トイレの姿勢保持手すり



いつまでも
トイレで気持ちよく排泄したい

排泄環境を整え、自立を支援することは、
その人の尊厳を守ることです。

快適な排泄姿勢を保ち、自立を支援

工事不要で取付ができます。



必要性に応じて付け外しできます。



前手すりは、手すりフレームに
収納しレバーで固定します。


排泄姿勢保持

いきみやすいように、前かがみ姿勢をとり、しっかりと足を床につけます。



姿勢崩れに対応

前手すりと左右の手すりが、前屈姿勢を支えます

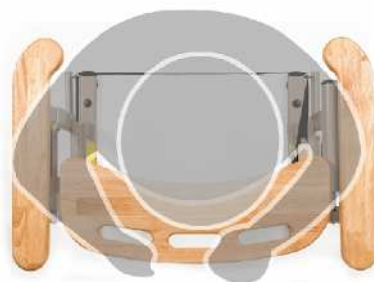

付け外し可能な大きな前手すりと、幅広い左右の手すりで姿勢崩れを支え、前傾姿勢を保ちます。

前方への姿勢崩れ



左右への姿勢崩れ



突然の体調変化による姿勢崩れ



環境・身体状況に応じて調節可能



製品名	まえてあ	材 質	手 す り: 天然木 手すりフレーム: ステンレス ジョイントバー: 芯材ステンレス・樹脂被膜 高さ調節つまみ、ハンドル: 樹脂 アジャスター、ベルト: 合成ゴム
製品番号	MT-100		
TAISコード	00837-000018		
製品質量	13kg		
最大使用者体重	100kg		
価 格	¥128,000 (税抜) ¥140,800 (税込)		

⚠ 警 告

禁止 しては いけない	■ 前手すりの上に乗ったり座ったりしない。		必ず守る 	■ 前手すりを装着して使用する場合は、必ず介助者が見守って使用する。	
	■ 予測をできない行動をとる方や自力で危険な状態から回避することができない方は使用しない。			■ 前手すりは、可動範囲内で使用し、ノブボルト・クランプレバー・ネジで必ず固定する。	

設置取付けは、納入業者または福祉用具専門相談員などの専門員に依頼してください。

■お申込み・お問合せ

株式会社タマツ

〒997-0857 山形県鶴岡市美咲町32-7
TEL 0235-23-6333 FAX 0235-25-3889