

ホットル専用ティッシュと水の補給方法

- ・電源コードを、必ずコンセントから抜いて、水の補給を行ってください。
- ・取扱説明書の「安全上の注意」を読み、適切な平らな場所に設置して、専用ティッシュと水の補給を行ってください。
- ・補給の際、水滴がたれる可能性があります。水滴を拭き取りやすいテーブルの上などで補給を行ってください。



①上ふたレバーを引き上げ、上ふたユニットを開けます。



②ヒンジボタンを押して、上ふたユニットを本体から外してください。



③付属の底じき金具を内容器の底へセットします。



④専用ティッシュを1本用意し、内容器へセットします。



⑤水差し等を使い、内容器のここまで線（上限水位）まで水を注ぎます。



⑥専用ティッシュの中心からティッシュの端をつまみ、上へ引き出します。



⑦上ふたユニットを本体のヒンジへ取り付けます。この時、取り出しふたの横にある絞りレバーのロックを外し、スライドさせて絞りローラーの隙間をあけておきます。



⑧引き出したティッシュを上ふたユニットのローラーの隙間へ通し、上ふたユニットを閉めます。

※指を挟んでケガをする恐れがありますので、十分にご注意ください。



⑨取り出しふたを閉め、絞りレバーのつまみをスライドさせ、絞りレバーをロックします。用意ができました。



⑩いつでも「あたたかいウェットティッシュ」を取り出せて、大変便利です。



ホットルプロ HPR-100
標準価格 1台 22,000円（税別）



ホットル専用ティッシュ HP-100
18×30センチ／カット 65カット／ロール
標準価格 1箱（5パック・10ロール入り） 8,700円（税別）

ご使用の際は、取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。
予告なくデザインや仕様が変更になる場合がございます。予めご了承ください。

7-05-2023.01

■製造元

株式会社 中川製作所
NAKAGAWA MFG. CO., LTD.
〒335-0005 埼玉県蕨市錦町2-5-21
TEL 048-444-8211 FAX 048-443-6652
www.nakagawa-mfg.co.jp

フリーダイヤル ☎ **0120-933-317**

■お問い合わせは下記へ

介護・医療
の必需品

あたたかいウェットティッシュを
いつでも。

NAKAGAWA MFG. CO., LTD.



ホットルPro

あたたかいウェットティッシュが大活躍！
ホットルProは、介護福祉士、ヘルパー、
看護師など介護業務に従事される方々の
ための業務用プロツールです。



コロナ禍で“使い捨て”を再評価

タオルの使い回し……………▶
リサイクル方式のおしぼり……………▶

採用事例
増加中！

ホットルProは4代目

初代ホットルは、介護や医療の現場で永年にわたり、ご愛顧いただきました。2代目ホットルベビーは、ご要望の多かった赤ちゃんのおしり拭きのニーズにお応えしました。3代目のホットルケアは、ヘルパーや介護福祉士、看護師など介護業務に従事される方々から強いご要望を多数いただき、開発に至りました。そして4代目のホットルProは、その名の通り、介護や医療のプロユースの機能性をさらに高め、開発いたしました。



ホットル



ホットルベビー



ホットルケア

シリーズ
6万台の
販売実績

使い方はカンタン

「ホットルPro」に専用ティッシュをセットして水（※1）を注ぎ、電源を入れるだけ。これで昼でも夜でも快適温度に温められたウェットティッシュの出来上がりです。空だき防止機能で安全です。

天然素材のやわらかさ

専用ティッシュは、天然パルプを主原料とした不織布。ソフトで弾力性があり、市販ティッシュの6～8倍も丈夫です。吸水力や保水力に優れており、汚れをキレイに拭き取り、肌ざわりはあくまで優しい理想的な素材です（※2）。

お湯で保温、 使い捨てで衛生的

防腐剤やアルコールなどの薬品を一切使用せず、70℃のお湯だけで保温します。だから、デリケートな肌をお持ちの方にも安心してご使用いただけます。あせもやかブレ予防にも効果的です。専用ティッシュは使い捨てなので大変衛生的です。

便利な業務用プロツール

電源を入れ約40分で湯温が約70℃になります。電源を切った場合、2時間後でも約60℃を保持しますので、持ち運んでの作業にご使用いただけます。ハンドルがついていて持ち運びに便利です（※3）。専用ティッシュにはミシン目が入っていて、片手でサッと、あたたかいウェットティッシュを素早く取り出せます。サイズは大きめの18×30センチでボリュームがあり、汚れなどをしっかりキレイに拭き取れます。介護や医療、保育といった様々な現場で大活躍します。

- ※1 飲料に適した水道水をご使用ください。
- ※2 使用したティッシュはトイレには流せませんのでご注意ください。可燃ゴミとして処理してください。
- ※3 衛生面を考慮し、持ち運んでの作業時以外は常時通電の上、専用ティッシュは1週間以内に使い切ることをお勧めします。それ以上経過した場合はティッシュと水を新しいものに交換してください。

Voice

初代ホットルからホットルProまで、お使いいただいている皆様の声を集めました。

介護の現場で

介護福祉士やヘルパーの方の声



キレイに拭き取れ、使い捨てなので衛生的

排泄介助の時に使います。専用ティッシュを取り出して、4つにたたんで用意します。水をしっかり含んでいますので、キレイに拭き取ることができます。なんといっても、使い捨てなので衛生的です。



気持ちが伝わるあたたかさ

あたたかいので、入居者の方からも大好評です。入居者の方をキレイにしてあげたいという気持ちに、ホットルはしっかり応えてくれます。



大変な作業がなくなり、大助かりです！

以前はタオルを使っていましたが、消毒して、洗濯して、たたんでウォーマーに入れる作業を1日に2～3回繰り返す必要があり、大変な手間がかかっていました。それに比べ、ホットルは専用ティッシュと水を入れ、コンセントに差し込むだけでカンタンです。



排泄介助の必需品

排泄介助には、欠かせない必需品です。新しく来た、経験のあるスタッフから「こんなにいいものがあったの!？」という声を聞くことがあります。

医療の現場で

看護師や介護福祉士の方の声



寝たきりの患者様の排泄介助に

寝たきりの患者様の病棟で、排泄介助に使用しています。各病室に1台ずつ、オムツ交換用のワゴン2台に各1台ずつ、看護室に予備の2台、食堂に1台使っています。準備に手間がかからないのが便利です。ティッシュの取り換えもカンタンです。



使ってわかる！ 使い勝手の良さ

あたたかくて、水分の絞り具合も丁度よく、汚れをキレイに拭き取れ、使い勝手が大変良いです。その良さは、使ってみないと中々わからないかもしれません。今では手放せません。使い捨てなので、衛生面も安心です。



検査で使用するゼリーやクリームの拭き取りに

（検査科で）ゼリーやクリームを使用する検査には必需品です。あたたかいので不快感はありませんし、しっかり拭き取れ、患者様到大変好評です。



使い方広がる「あたたかいウェットティッシュ」



在宅介護で
大変な排泄介助にあたたかい愛情



保育で
赤ちゃんのおしり拭きに



エステサロンで
化粧やオイル・クリームの拭き取りに

あたたかいウェットティッシュはお手ふきやお口ふきにも大変便利！中々無かった商品として、一度お使いいただくとその使い勝手の良さを実感いただけます。