



アイファン
ifan

ふくらはぎ 着圧ソックス

段階的な着圧設計・美脚対策・綿素材使用

ふくらはぎ
16
hPa

引き締め着圧で/
脚キレイ
快適・快眠
をサポート!

足首
24
hPa

サイズ	23cm-25cm
	25cm-27cm

安心の日本製

※写真は 着用イメージです。

Check!

このようなお困り事がある方におすすめです

- ☐ 夜トイレに繰り返し起きてしまう
- ☐ 遠くへのドライブや旅行を楽しみたい
- ☐ ぐっすり眠れない
- ☐ 足の疲労感がとれない



\ 快適・快眠をサポート! /

第二の心臓「ふくらはぎ」の筋肉のポンプ作用をサポートし水分・老廃物を循環。

Point
1

段階着圧設計で筋肉のポンプ作用を活性化

足首からふくらはぎにかけて段階的な圧力が加わることで、疲労の蓄積を軽減し、快適な生活ができます。

Point
2

テーピング編みで筋肉の動きをサポート

筋肉に沿った独自の編み方(テーピング編み)が、筋肉の動きを補助し、運動能力向上に貢献します。

Point
3

引き締め段階着圧設計で脚キレイ

段階着圧設計で脚をキュッと引き締め、脚をキレイに見せます。

ふくらはぎ
16
hPa

足首
24
hPa




右

着用方法



履き口内側のサイズ印を確認し、たぐりよせる。

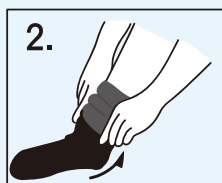

足を入れてつま先からかかとへ向かって上へ引き上げる。



上端をつかみ、裏返した部分を戻すように上へ引き上げる。



くるぶしの位置や、しわができないように確認して整える。

素材：綿、ナイロン、ポリウレタン

●次のような場合は着用をお止めください。

- ・着用部(足首からふくらはぎにかけて)に傷、炎症、ケガがある。
- ・手足に何らかの障害(神経障害、しびれなど)がある。

●次のような方は着用について医師にご相談ください。

- ・高血圧、心臓病、糖尿病などによる血行障害のある方。
- ・着用中、または着用後に皮膚の異常(かぶれなど)、しびれ、痛みなどがみられた方。
- ・高齢者、妊娠中の方。

●着用中の次のような使用、動作はお止めください。

- ・長時間の正座などのひざを曲げて脚を圧迫する姿勢。
- ・本製品、または他の着圧ソックスなどの締め付けるタイプの商品と重ね履き。
- ・履き口や裾などを折り返しての着用。

●その他注意

- ・キツく感じることもありますが、高い伸縮性でふくらはぎをサポートするための仕様です。
- ・洗濯時は洗濯ネットをご利用ください。
- ・「サイズ表記」が足のすね側にくるように着用ください。

ご購入はこちら！



SAGA 佐賀ファクトリーショップ
FACTORY SHOP

saga-factoryshop 検索



アイダ靴下株式会社

〒849-0501 佐賀県杵島郡江北町大字山口1619

TEL 0952-86-3211

営業時間 9:00~17:00
(土、日、祝日を除く)