



as human, for human
PARAMOUNT BED

大切な人だから、
特別な一台を。



新発売

楽匠Lwing

らくしょうウイングシリーズ

Wide&Longで特別なゆとりの空間を

100cm幅のワイドサイズ。ロングサイズへの切り替えも可能です。

布団やシングルサイズのベッドと同じ感覚で使える100cm幅。

大きく寝返りがうてるサイズです。

さらに、ベッドの長さの切り替えも可能です。

頭側、足側の部品の取り付け位置を変えるだけで191cmから205cmに延長でき、頭側にも足先にもゆとりが生まれます。



*頭側、足側の両方向に延長します。*延長マットレス(別売)が必要です。

パラマウントベッド株式会社

特別な一台だから、特別な背あげを

独自の背あげ機能 ラクリアモーションでより座位に近い姿勢で起きあがれる。



背と膝の動きにベッドの傾斜を組み合わせたパラマウントベッド独自の背あげ機能です。

身体のずり落ちや圧迫感を大幅に軽減しながら、足先のさがった安定した姿勢で起きあがれます。

また、背あげをするときに体圧を仙骨部からお尻と太ももに再分配し、床ずれリスクにも配慮しています。

ラクリア3モーション

座位に近いため、疲れにくく
腕や上体が動かし
やすくなります。



ラクリア2モーション

ラクリア3モーションよりも、膝が水平に
戻るタイミングが早いため、
最後まで背をあげきらずに
離床する方に適しています。



低床設計だから安心感が高く、布団からも移行しやすい。

ゆかからボトム上面までの最低床高は21.5cm。

足がおろしやすく、ベッドに慣れていない方にも違和感が少ないため、安心して使える低さです。

高さ調節機能で最高65cmまで高くすることができます。介護する方は腰に負担がかかりにくい姿勢がとれます。

大切な人だから、確かな安心を

手元スイッチで、家族のスマートフォンとつながる。

手元スイッチの呼び出しボタンを押すと、無線(Bluetooth)が届く範囲にあるスマートフォンに通知できます。

*専用の「ベッド操作アプリ」をインストールしたスマートフォンをベッドに登録する必要があります。詳しくは「ベッド操作アプリ」内のヘルプをご覧ください。
*本機能は、緊急時の使用を目的としたものではありません。*スマートフォンおよび呼び出し受信機と連携した各機能はJIS認証範囲外となります。



スマートハンドルで停電などの緊急時にベッドを操作できる。

災害などによる停電、ベッドの故障*などの緊急時に、ハンドル操作でベッドポジションを調節できる

スマートハンドル(電動ベッド専用 手回し発電機)を用意しています。*故障内容によっては操作できない場合があります。

ベッドの機能	スマートハンドル	製品コード	TAISコード	価格
ラクリア3モーション	別売	KQ-W6529	00170-001665	オープン価格
	付属	KQ-W6529S	00170-001666	
ラクリア2モーション	別売	KQ-WA529	00170-001667	
	付属	KQ-WA529S	00170-001668	
2モーション	別売	KQ-W5529	00170-001669	
	付属	KQ-W5529S	00170-001670	

*スマートハンドル付属モデルは、JIS認証を取得したベッドとスマートハンドルKQ-P70Sをセットにして販売するものであり、セットで認証を取得したものではありません。



産業標準化法に基づくJISマーク表示
制度において次の登録認証機関が
規格適合したことを認証した商品
JQA 一般財団法人 日本品質保証機構

パラマウントベッド株式会社

製品の
お問い合わせは **お客様相談室 フリーダイヤル 0120-03-3648**
土・日・祝日も受付いたします。受付時間:9:00~17:00(年始1/1~1/3は休業いたします)

本 社 〒136-8670 東京都江東区東砂2丁目14番5号
東京支店 〒136-8670 東京都江東区東砂2丁目14番5号
札幌支店 〒060-0062 札幌市中央区南2条西13丁目318番地11
仙台支店 〒984-0015 仙台市若林区卸町2丁目3番地の3
さいたま支店 〒336-0967 さいたま市緑区美園3丁目23番1
横浜支店 〒194-0004 東京都町田市鶴間5丁目3番33号
名古屋支店 〒461-0001 名古屋市東区泉1丁目20番17号
大阪支店 〒550-0001 大阪市西区土佐堀2丁目3番33号
高松営業所 〒761-8031 高松市郷東町223番1
広島支店 〒733-0011 広島市西区横川町3丁目8番5号
福岡支店 〒812-0013 福岡市博多区博多駅東3丁目14番20号

☎(03)3648-1111(代)
☎(03)3648-1171(代)
☎(011)271-1181(代)
☎(022)239-5211(代)
☎(048)878-0100(代)
☎(042)795-8800(代)
☎(052)963-0600(代)
☎(06)6443-8791(代)
☎(087)881-8900(代)
☎(082)293-1311(代)
☎(092)461-1131(代)

製品のお求め、ご相談は…

安全に関するご注意
製品を正しく安全にお使いいただくため、ご使用前に必ず取扱説明書をお読みください。

●カATALOGと実際の製品の色とは、印刷の関係で多少異なる場合があります。

J23-C00849