

足こぎして自分でロックがかけられる  
折りたたみシャワーキャリー

# ハイベルSW

NEW

特定福祉用具・特定介護予防福祉用具    介護保険(購入)    特許取得済

脚 掛 け    はね上げ    ストッパー    駐車用ブレーキ

そ の 他    ・座面シート脱着    ・ティッピングレバー    ・ノーパンクタイヤ

簡単に折りたたんでコンパクト



どこでも  
連れて行  
けます!




品番: HB301

¥116,600 (税抜¥106,000)

座面真ん中を持ち上げた後、座面端を持って挟むように押してください。  
簡単に折りたたむことができます。

乗り降りがしやすい

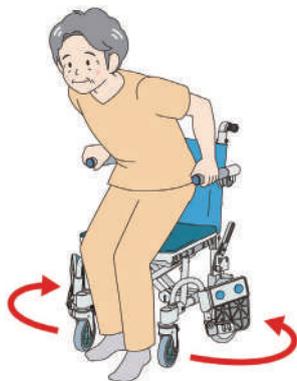

脚部が左右に開くので、乗り降りがしやすくなります。

フットレスト取り外し



フットレストを持ち上げるだけで、かたんに取り外すことが可能です。  
利用者を抱きかかえながらも、片手でかたんに取り外せます。

手元でロックがかけられます



ロックレバーを後方に引くだけでロックが掛かります。前方に押すとロック解除されます。



ロックした後、レバーの向きが変えられるので、横移乗に邪魔になりません。

## 仕 様

品 名	ハイベルSW
品 番	HB301
材 質	本体/アルミ*、ステンレス*、合成樹脂成形品    グリップ/PVC    座シート/EVA 背シート/ナイロンメッシュ    タイヤ/PU(発泡)    *粉体塗装仕上げ
重 量	約12kg
耐 荷 重	約100kg
介護保険	購入対象品
JANCODE	4519283006198
TAISコード	00129-000363

※介護保険対象品につきましては、各市区町村の介護保険担当窓口までご確認ください。  
※商品写真は印刷物ですので、実際の色とは若干異なる場合があります。

## サイズ

幅	52.5 (28) cm		
奥行	84.5 (86) cm		
高さ	84 (84) cm		
前座高	44.5cm	後座高	44cm
座幅(肘~肘)	41cm	座奥行	39cm
肘から前座	25cm		
前座から足台	40.5cm		
奥行(フットレスト無し)	57cm		
車 輪	前輪キャスター 5インチ    後輪タイヤ 10インチ		

※( )は折りたたみ時のサイズ

uchie®  ウチエ株式会社    <http://uchie.co.jp>

取扱店

本社/大阪営業所 〒660-0805 兵庫県尼崎市西長洲町2-8-29  
TEL.(06)6482-0230 FAX.(06)6401-6372

福岡営業所 〒819-1107 福岡県糸島市波多江駅北4-6-5  
TEL.(092)323-4331 FAX.(092)323-4332

関東営業所 〒271-0087 千葉県松戸市三矢小台4-12-3  
TEL.(047)362-0311 FAX.(047)362-0312

兵庫工場 〒673-1334 兵庫県加東市吉井732-1