

肘掛けが前倒れ防止に…  
シートを傾けて座位を安定シャワーキャリー

# はいらくチルト4輪自在

特定福祉用具・特定介護予防福祉用具

介護保険(購入)

組立要

肘 掛 け はね上げ・セーフティロック

ストッパー キャスターダブルロック

そ の 他 チルト機能  
フットレスト脱着  
フットプレートはね上げ

穴無しシート/  
ヘッドレスト無し  
品番: HR043

NEW

穴無し

¥198,000  
(税抜¥180,000)

U型

¥195,800  
(税抜¥178,000)

穴無し/ヘッドレスト無し

¥184,800  
(税抜¥168,000)


U型/ヘッドレスト無し

¥182,600  
(税抜¥166,000)



U型シート  
品番: HR042

## かんたん操作で楽にチルトができます

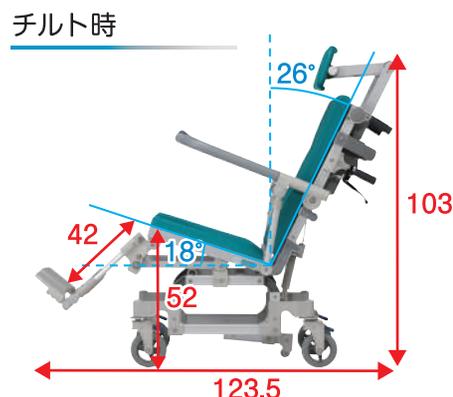

(単位: cm)

ハンドル下のチルトレバーを握りながら、ハンドルを押し下げるとチルトができます。  
チルト角度は105~116°の間で無段階に調整が可能です。  
座面にかかる体圧を分散させ、体のズレを 방지、安定した姿勢を保つことが可能です。楽な姿勢で体が洗えます。

## 自在輪でラクラク小回り

その場での転回



真横移動



小回りが利くので、その場での本体360度の転回が可能です。  
また、4輪全て自在輪で、お風呂やベッドへ真横移動できます。切り替えレスペーがいません。

## 横移乗もラクラク

前方グリップは座位保持に使えます。

肘掛けは左右ともはね上げ式です。浴槽への移動ができます。



## 取り外せるフットレスト



フットレストはピンロックでかんたんに取り外しが可能です。また、レッグサポートは後ろに倒すことができ、フットプレートと共に後方移動させることで乗り降りする際に邪魔になりません。

## 移乗に便利なのはね上げ仕様




肘掛けははね上げ式で横移乗や介助がラクに行えます。また、フットプレートも横にはね上げ、後方に回転させることができますので、乗り降り等に便利です。

## ストッパー付きで安心



片足でストッパーがワンタッチロックできます。ダブルロックタイプなので、旋回、車輪回転を同時にロックし、安全にご使用いただけます。

## 後方転倒を防ぐ転倒防止バー

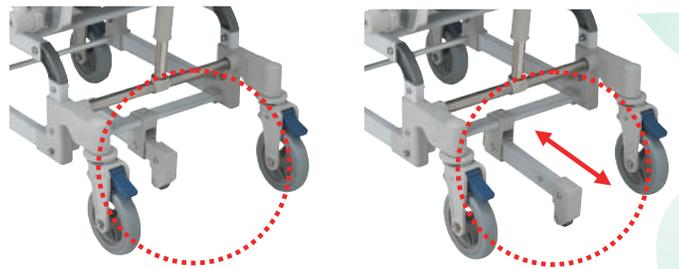


本体が後方に転倒するのを防ぐ転倒防止バーが付いています。走行の邪魔をしない小さなキャスター付きです。バーの長さが使用状況に応じて調節できます。

## 取り外せるヘッドレスト



ヘッドレストは取り外しが可能です。背が低い利用者様や、体が洗にくい時など、ヘッドレストが必要な場合は取り外してご利用いただけます。  
※HR041・HR042

## 頭を支えるヘッドレスト

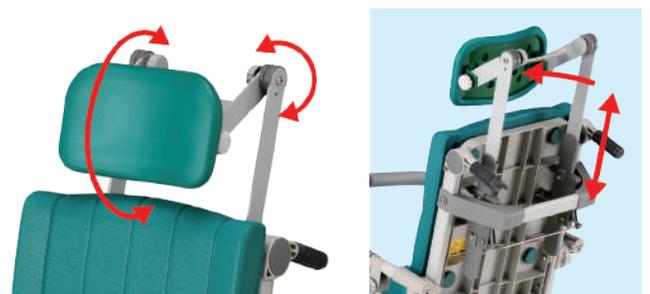


ヘッドレストは高さ、奥行、角度調整が可能です。チルト時も頭をしっかり支えます。※HR041・HR042

### サイズ

① 幅	56cm
② 奥行	112 (123.5) cm
③ 高さ	113 (103) cm [100.5 (95)] cm
④ 座幅(肘～肘)	44.5cm
⑤ シート奥行	40 (40) cm
⑥ 肘から前座	28.5 (28.5) cm
⑦ 前座高*	47 (52) cm
⑧ 後座高*	42.5cm
⑨ 前座～足台	42 (42) cm
⑩ 奥行(フットレス無し)	81.5 (94.5) cm
チルト角度	105°～116°
キャスター	5インチ

### 規格図

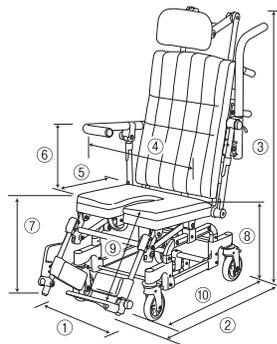

### 仕様

品名	はいらーくチルト4輪自在	
品番	HR041 (穴無し)	HR043 (穴無し/ヘッドレスト無し)
	HR042 (U型)	HR044 (U型/ヘッドレスト無し)
材質	本体/アルミ、ステンレス、合成樹脂成形品 シート/EVA タイヤ/天然ゴム、PU (発泡)	
重量	約19kg (ヘッドレスト無し) 約18kg	
耐荷重	約100kg	
介護保険	購入対象品	
JANCODE	4519283006099 (穴無し)	4519283006112 (穴無し/ヘッドレスト無し)
	4519283006105 (U型)	4519283006129 (U型/ヘッドレスト無し)
TAISコード	00129-000349 (穴無し)	00129-000351 (穴無し/ヘッドレスト無し)
	00129-000350 (U型)	00129-000352 (U型/ヘッドレスト無し)

※ [ ] ヘッドレスト無し ※ ( ) 最大チルト時 ※ ヘッドレスト最低高さ \*乗車時

uchie®  ウチエ株式会社 <http://uchie.co.jp>

取扱店

本社/大阪営業所 〒660-0805 兵庫県尼崎市西長洲町2-8-29  
TEL.(06)6482-0230 FAX.(06)6401-6372  
関東営業所 〒271-0087 千葉県松戸市三矢小台4-12-3  
TEL.(047)362-0311 FAX.(047)362-0312

福岡営業所 〒819-1107 福岡県糸島市波多江駅北4-6-5  
TEL.(092)323-4331 FAX.(092)323-4332  
兵庫工場 〒673-1334 兵庫県加東市吉井732-1