

POJI SHEET

ポジシート

＼ 身体に触れずに /
自然と寝返りを打つような
体位変換！



介護保険：福祉用具貸与（体位変換器）

こんなお悩みありませんか？

- ✓ 重度介助の方は、体位変換の際、身体に触れられるリスクがある。
(骨折、皮膚の炎症、過度の筋緊張など)
- ✓ 体重の重い方の体位変換が大変
- ✓ 夜間の体位変換がキツイ
- ✓ 介助初心者の方でもスムーズに行いたい

重度介助の方へ


睡眠中の体位変換、骨折、皮膚の炎症、過度な筋緊張など、身体に触れられる苦痛を少なくするために開発。

本製品は、身体に触れることを避けたい重度介助を必要とする方におすすめです。


右側臥位

身体に触れずに体位変換


左側臥位

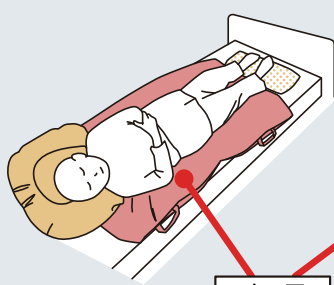

本品

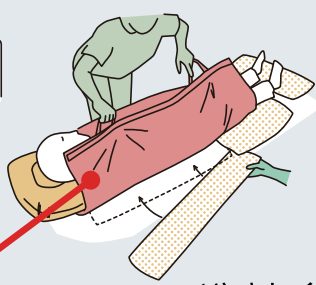

<やさしく・安心>

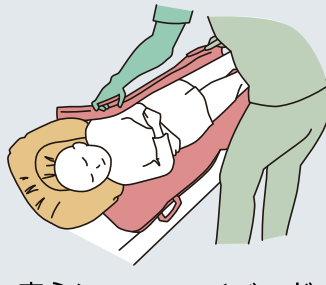

<ベッド中央への微調整も楽>




RAKUDES. ポジシート 3つの特長 /

CHECK 1

利用者様の身体への負担を最小限に抑えて、介護する方にも、操作し易いサイズです。

日本人の平均身長と人間工学に基づいて実証実験を行い、利用者様の頭部重心ごと静かに寝返りでき、かつ介護者が扱いやすいベストなサイズにしました。

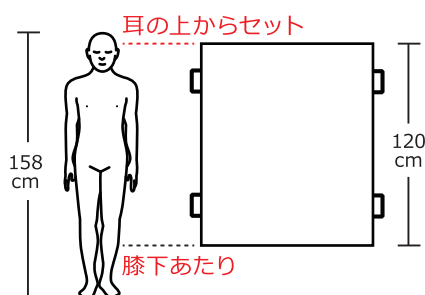

取っ手は、力が入れやすい位置についており、扱い易いサイズです。ベルトで補強しています。※移動用リフトのつり具としては、利用できません。

【仕様】

サイズ	2×90×120cm
生地	ポリエステル65%、綿35%
中素材	特殊ウレタン
体圧分散	通気性に優れ洗濯可能
重量	1.5kg
色	アイボリー

価格： 46,200円（税込）
42,000円（税抜）

【監修】

特別養護老人ホーム五十鈴荘
平成27年度 静岡市新商品研究開発事業 採択

【製造販売元】


株式会社丸井商事／ラクデス
静岡市清水区東大曲町4-18
TEL：054-366-1612／FAX：054-366-1738

CHECK 2

体圧分散力が高く、褥瘡のリスクを防ぐ。

マットレスと併用することで、褥瘡予防になる40mmHg以下の体圧になっています（自社測定）。そのため、利用者様とマットレスの間に常に敷いて使うことで、褥瘡予防のリスクを防ぐことが期待できます。

体圧分散の実証データ

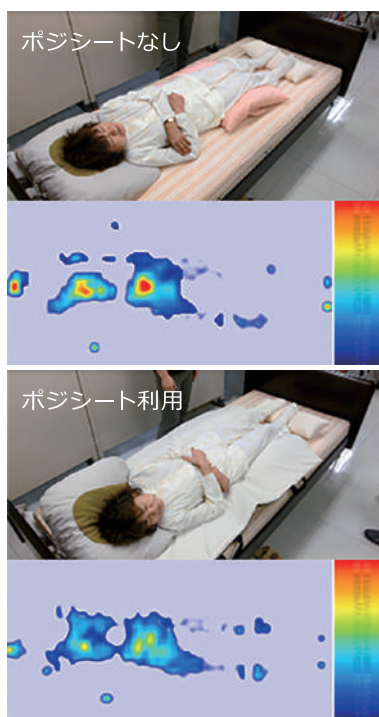

<測定：静岡県工業技術研究所XSENSOR社X3 PRO>

CHECK 3

丸洗いき、いつでも清潔に。

汚れたときに丸洗いできるため、いつでも清潔な状態を保つことができます。カバーから中本体を外して、それぞれ洗濯できます。



【使用例】

ポジシートなし



身体に触れる体位変換は、利用者様の筋緊張を招き、負担となります。さらに、ポジショニングにも技術が求められます。

ポジシートあり



身体に触れずに体位変換でき、利用者様の負担も軽減されるとともに、ポジショニングもしやすいです。

動画で
利用イメージを
チェック！



ご注文・商品の詳しい説明はホームページで

<http://www.rakudes.com>

ウェブで検索！

ラクデス ポジシート

