

ご購入前にご確認をお願いします


この度はパナソニックの可動式入浴台アクアムーブのお取り扱いを検討いただきまして、誠にありがとうございます。

浴室環境によっては導入できないことがございますので、下記をご確認のうえ、FAX返送いただけますようよろしくお願い申し上げます。

(パナソニックFAX番号:06-6908-4506)

なお、今後の商品開発等の参考のために、アンケートにもご回答いただけましたら幸いです。(アンケート回答は任意です。)

■確認事項

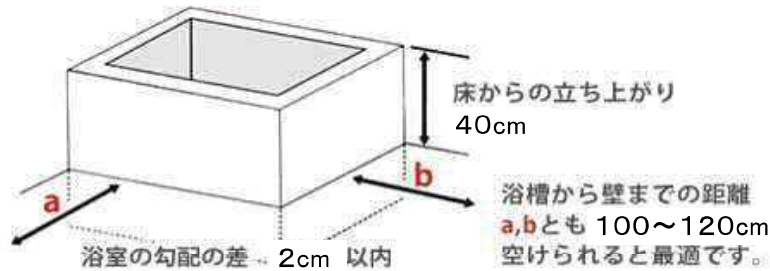

・導入できる浴槽壁の高さは35~45cm です。

※設定できる高さ:35cm、36.25cm、37.5cm、38.75cm、40cm、41.25cm、42.5cm、43.75cm、45cm

・導入できる浴槽形状は、アクアムーブが隙間なく横付けできる柵型浴槽です。

・アクアムーブを移動する範囲内の勾配高低差が2cmより大きいと、移動できません。

脱衣場と洗い場の間に段差(2cm以上)がある場合も、乗り越えることができません。

※移動時に浮かせてある四隅のブレーキ脚が床面に引っかかってしまいます。

※段差に対しては、スロープなどを設置してください。

※バスマットやすべり止めマット上を移動する際も、厚さや波打ち状態によってはブレーキ脚が接し、動かしづらくなります。

★上記を判断する上でデモ機が必要な場合は、お貸しいたします。

(返却時の送料はご負担願います。貸出中の場合は、順番待ちいただくことをお許し願います。)

■アンケート

・アクアムーブをどのようにしてお知りになりましたか？

・お使いにならえる個浴の環境を教えてください。

①浴槽壁の高さ : () cm

②施設内の個浴槽の数 : () 台

ご協力 ありがとうございました。

上記の確認事項について、確認しました。

施設名

ご担当者名

※販売店様が代行記入いただいても結構です。