

ベッドマット全体を防水！

は剥ガッシュ

洗うより、
剥がす方が
ラクでしょ？

ミシン目
ペリペリ

3層重ね

ズレにくい

ウラに通らない！


ホワイト
シーツ1組

3回分


業務時間の短縮 / 人手不足の解消

セットの仕方


- ① シーツのおもてとウラを確認
(サラサラ面が上、ツルツル面が下)
- ② マットレスの頭部分に
シーツを引っ掛ける
(上部のみボックス型になっています)
- ③ シーツの余りを
マットレスの下へ折り込む

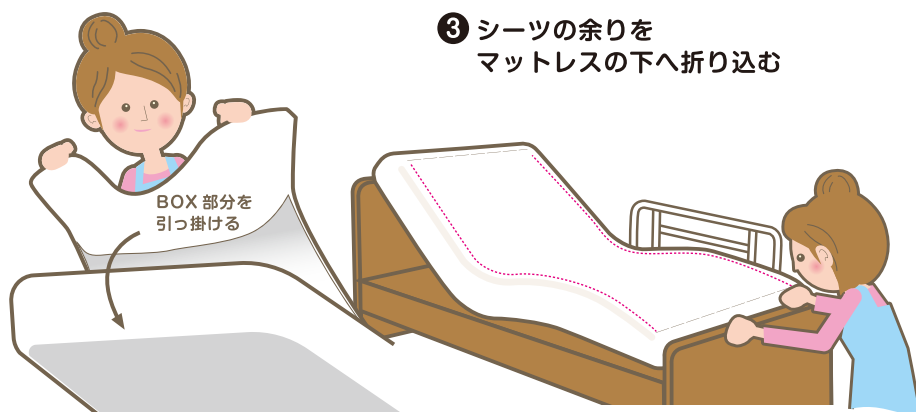

基本の剥ガッシュ

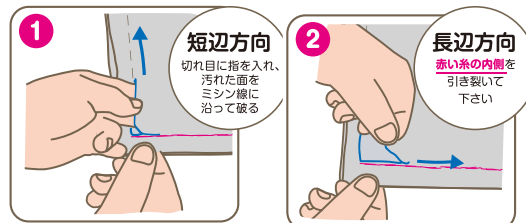

寝たまま剥ッシュする方法

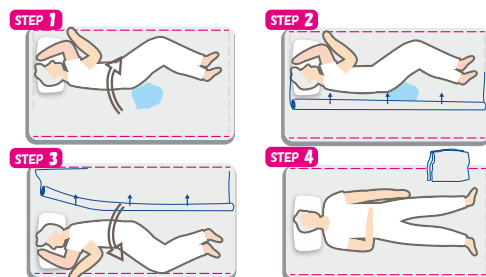

今日からは洗うより、剥がす！



コストイメージ

病院の場合

※看護師給与平均分給：厚生労働省令和6賃金構造基本統計調査結果による

	人件費	(作業12分 × 人件費※1 分給44.8円)
+	洗濯代	150円/枚
+	吸収シート代	200円/枚
		= 約 888円

剥ガッシュ 購入代

	人件費	(作業4分 × 人件費※1 分給44.8円)
+	洗濯代	
+	剥ガッシュ購入費	550円/枚
		= 約 729円

介護施設の場合

※令和6年度介護従事者処遇状況等調査結果

	人件費	(作業12分 × 人件費※1 分給18.5円)
+	洗濯代	150円/枚
+	吸収シート代	200円/枚
		= 約 572円

	人件費	(作業4分 × 人件費※1 分給18.5円)
+	洗濯代	
+	剥ガッシュ購入費	550円/枚
		= 約 624円

シーツ交換の作業工数を半減、時間は65%以上短縮できます

1ベッドあたりの業務工程項目と時間		今まで 従来シーツ（洗濯） と 防水シーツ※2	ご提案 剥ガッシュ
1	シーツ物品準備	1:00	無くせる！ 1:00
2	窓を開け換気	0:10	0:10
3	ベッド上の物を安全な所へ移動	0:15	無くせる！ 0:15
4	ベッド柵を外す(2か所)	0:30	無くせる！ 0:30
5	ベッドブレーキを外し位置を変えシーツ交換をしやすくする	1:00	無くせる！ 1:00
6	シーツを剥がす	0:20	1:00
7	シーツを敷く	3:00	無くせる！ 3:00
8	防水シーツを敷く	0:40	無くせる！ 0:40
9	綿毛布をセット	0:20	無くせる！ 0:20
10	カバーを付け包布をセット	1:30	0:20
11	枕をセット	0:30	1:30
12	ベッド柵を戻す(2か所)	0:30	0:30
13	ベッド位置を元の位置に戻す	0:40	無くせる！ 0:40
14	ベッド上に合った物を戻す	0:30	無くせる！ 0:30
15	使用済シーツを業者指定の袋に入れ、フロア内の指定場所へ	1:00	0:30
合計		11:45 (705秒)	65%OFF 4:00 (240秒)

※1 上尾中央医科グループ 介護老人施設ハートケア流山
渡邉様・赤澤様 調べ

※2 高吸収ポリマー入りディスポシーツ含む

品名	剥ガッシュ
本体サイズ	シングルサイズ 全体サイズ：縦 240 cm × 横 175 cm 臥床部分：縦 190 cm × 横 87.5 cm
対応マットレスサイズ	縦（長辺）200 cmまで 横（短辺）100 cmまで 厚み 25 cmまで
素材	表面材：不織布 裏面材：ポリエチレン
外装材	ポリエチレンフィルム

ご使用上の注意 必ずお読みください

- 本製品は「使い捨ての防水シーツ」です。他の用途での使用はお控えください。
- 長期間の使用で摩擦が進み、液体漏れが生じる可能性があります。このようなトラブルに関しては責任を負いかねますので、1組につき10日を目安に使い切るようお願いいたします。
- シーツを強く引っ張ったり、無理な力を加えたりしないでください。生地が傷つくと液体漏れの原因となります。
- ミシン目の隙間から物が入り込まないようにご注意ください。
- 本商品は紙おむつのような吸水力はありません。紙おむつ等との併用を推奨します。
- 長期間の使用により毛玉ができることがあります。毛玉が肌に触れると褥瘡の原因となる場合があります。発生した際は速やかに交換してください。
- お肌に異常が生じた場合は、ただちに使用を中止し、医師にご相談ください。
- 電気毛布や電気あんか等との併用は避けてください。高温により生地が溶ける恐れがあります。
- ストーブや火気の近くに置かないでください。引火の危険があります。
- 伸縮性のある素材を使用しているため、サイズに多少のバラつきが生じる場合があります。
- 外袋をかぶったシーツを口に入れたりしないでください。窒息の原因となる恐れがあります。
- シーツを剥がした後に破片が出る場合があります。口に入れないよう十分にご注意ください。

- 【保管上の注意】
 - ・高温や多湿、直射日光を避け、お子様の手の届かない所に保管してください。
- 【使用後の注意】
 - ・廃棄する場合は、汚れた部分を内側に丸め、衛生的に処分してください。
 - ・本製品は水に濡れませんのでトイレに流さないでください。排水管を詰まらせる可能性があります。
 - ・本製品を洗濯しないでください。誤って洗濯すると、シーツがバラバラになり、繊維が衣料につくことがあります。
 - ・使用後のシーツの廃棄方法については、お住まいの地域のルールにしたがって処分してください。

WAN@CARE

株式会社ワノケア

267-0061 千葉県千葉市緑区土気町 1691-35

TEL: 043-312-7033

FAX: 043-312-7333

営業直通: 090-3048-4398

<https://wano.care/>

パペットケリー

使い捨てケリーパッド
洗髪以外にも活躍中

