

# New Model!

工具なしでシート幅が調整でき、体の大きめのご利用者様に幅広く対応します。(シート幅42・44・46cmの3段階調整式)

**NA-SU7・Hi** 捕装具車椅子  
レディメイド

249,500円(非課税)

00175-000435

耐120kg 自走用



シート幅調整式  
**SU7タイプ**  
シン・ウルトラ  
自走用

ティップイン  
外径Φ20


前座高  
調節式<sup>※1</sup>  
43-45-47  
cm cm cm



いつでも空気がいっぱいの感覚で安心

**NA-SU7・Hi**

■車いす寸法  
赤は初期出荷時設定

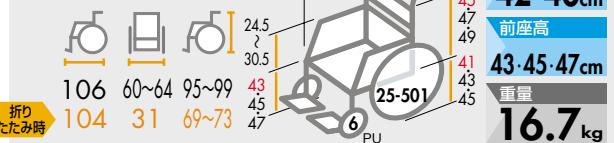

\*シート幅はアームサポートパイプ内々の寸法です。

\*重量には座クッション重量を含んでおりません。※臀部スペースの有効幅はシート幅と同寸です。

\*上記は座クッションを装着していない場合の寸法です。

**NAH-SU7・Hi** 捕装具車椅子  
レディメイド

249,500円(非課税)

00175-000436

耐120kg 介助用



シート幅調整式  
**SU7タイプ**  
シン・ウルトラ  
介助用

ティップイン  
外径Φ20


前座高  
調節式<sup>※1</sup>  
43-45-47  
cm cm cm



いつでも空気がいっぱいの感覚で安心

**NAH-SU7・Hi**

■車いす寸法  
赤は初期出荷時設定

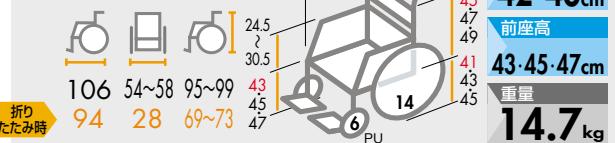

\*シート幅はアームサポートパイプ内々の寸法です。

\*重量には座クッション重量を含んでおりません。※臀部スペースの有効幅はシート幅と同寸です。

\*上記は座クッションを装着していない場合の寸法です。

工具いらず、簡単操作でシート幅調整。

■工具いらず、  
簡単操作でシート幅調整



\*シート幅の調整については、取扱説明書の手順と注意事項を必ずお読みください。



手順1

バックサポートシートと座クッションをはずし、インナーシートの面ファスナーをはずします。



手順2

カバーをはずし、ロックピンをつまんでロックを解除します。



手順3

そのまま折りたみフレームを任意の位置までスライドします。



手順4

ロックが完全にかかっていることを確認し、カバーをかぶせます。



手順5

インナーシートの面ファスナーを貼りあわせ、バックサポートインナー下部を調整し、アウターシートと座クッションを装着して完了です。



▲シート幅の調整で体形の変化や着こみにも対応します。



バックサポート高  
簡単調整

インナーシートを通すパーツの高さをかるだけで、簡単にバックサポート高を調整できます。(3段階、2cmピッチ)

標準フレームカラー



標準バックサポートカラー



ご注文時には、  
バックサポートカラーをご指定ください。