

# FC-コキュー君NV

車いす付属品（クッション）




もも着脱タイプ



フラットタイプ

おしりの形に自動フィット！

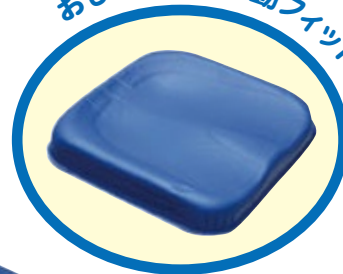

フラットタイプに  
38cm幅が新登場！


## 床ずれ対策にベスト！目玉バルブの自動調圧エアクッション

### Point①

#### コンビネーションバルブで 吸排気を自動コントロール

座ると自動的に空気を排気してお尻の形にフィット、立ち上がると素早く元の形状に復元、座るたびに最適な座り心地を得られます。

体動に合わせてエアを素早く吸排気するので、長時間座っても疲れにくいクッションです。

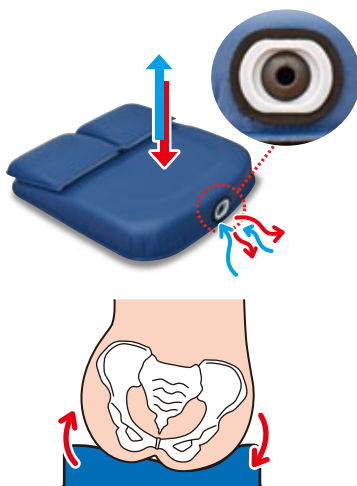

### Point②

#### バルブのリリーフ機能で どすん！と座っても安心

勢いよく座った時にはエアを一気に排出。着座時の衝撃や痛みを緩和し、急激な内圧上昇によるパンクも防ぎます。

▼エアを一気に排出する「リリーフ機能」



### Point③


#### ひとつのバルブで 幅広い対象者を カバー

体重 35 ～ 85kg の  
対象者に適応




48 kg

BMI:19 (普通体重)

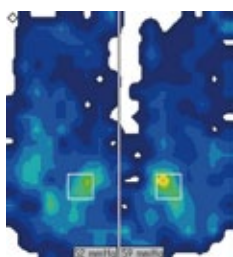


51 kg

BMI:16 (低体重)

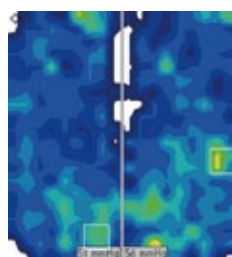

67 kg

BMI:24.1 (普通体重)

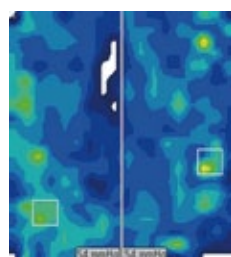

77 kg

BMI:27 (前肥満体重)

フラットタイプで測定



## 耐久性に優れた防水被膜でお手入れ簡単

クッション本体は、裏も表も耐久性と伸縮性に優れたウレタンフィルムを採用。  
汚れても清拭でキレイになるので、お手入れが簡単です。



## 前後の置き間違いを防ぐ表示付カバー



カバー色



ブルー




グリーン



## エアとウレタンのハイブリッド構造、 体圧分散＋姿勢保持を両立


エアの体圧分散性と、ウレタンの姿勢保持性によって、床ずれを防止しながら、座位姿勢の安定性を高めます。

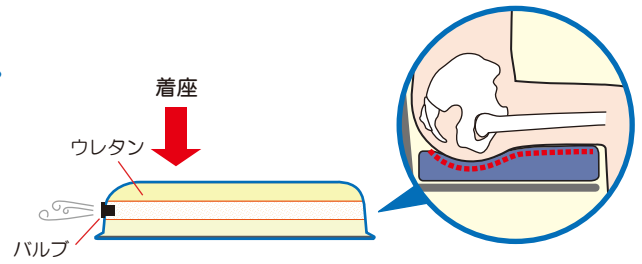

### 足こぎ対応！もも着脱タイプ



### 乗り降りしやすい！フラットタイプ

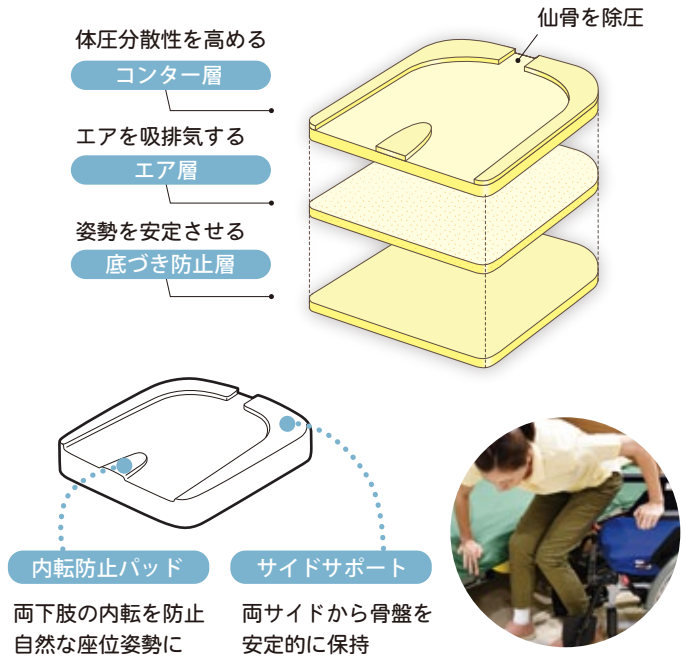

対象者




- ・座骨や仙骨の床ずれを防止したい方
- ・姿勢の安定や前滑りを防止したい方
- ・片麻痺で足駆動をさせる方
- ・股関節を深く屈曲できない方(大腿骨頸部骨折後、関節リウマチなど)

対象者




- ・座骨や仙骨の床ずれを防止したい方
- ・失禁や失便が多く、汚れが気になる方
- ・長時間車いすに座って過ごされる方
- ・車いすに乗り降りしやすいクッションが欲しい方

#### ●もも着脱タイプ

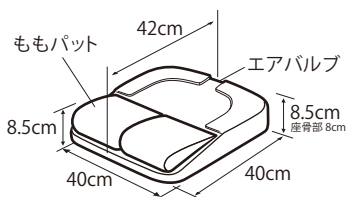

#### ●フラットタイプ

① 38cm 幅 ② 40cm 幅

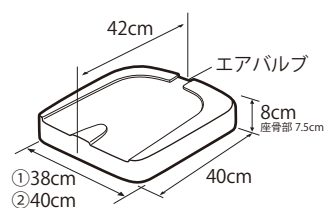

FC- コキュー君 NV		色	品番	価 格	重量	TAISコード	JAN コード
もも着脱タイプ	40cm 幅 (通気)	ブルー	FCNV-M-B	¥ 32,000 (税込 ¥ 35,200)	820g	00149-000064	4560232693761
		グリーン	FCNV-M-G				4560232693754
フラットタイプ	40cm 幅 (通気)	ブルー	FCNV-F-B	¥ 28,000 (税込 ¥ 30,800)	790g	00149-000065	4560232693792
		グリーン	FCNV-F-G				4560232693785
	38cm 幅 (通気)	ブルー	FCNV-F38-B	¥ 28,000 (税込 ¥ 30,800)	740g	00149-000069	4560232693891
		グリーン	FCNV-F38-G				4560232693884
材質	〈カバー〉表生地: ポリエステル、裏生地: ナイロン (ウレタン樹脂塗布) 〈クッション〉ウレタン樹脂フィルム、ウレタン複合材 〈バルブ〉硬質 PVC、ニトリルゴム						

**アイ・ソネックス株式会社**

〒702-8004 岡山県岡山市中区江並100-7

TEL:086-200-1550 FAX:086-200-1553

<https://www.nasent.net> ナーセント 検索

