

デコボコ形状の新感覚マットレス！

防水タイプ

通気タイプ


眠りが変わると介護も変わる

睡眠改善静止型マットレス


ナーセントコンタ®

モニター評価にて4つの効果を確認！


① 寝付きの良さ

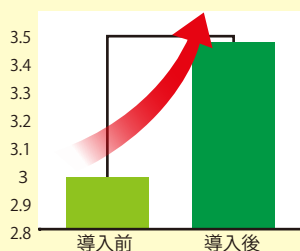


② 中途覚醒の減少

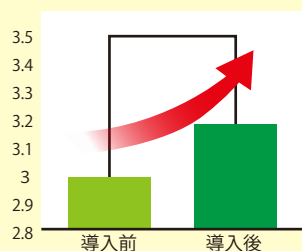

③ 夜間不穏の改善

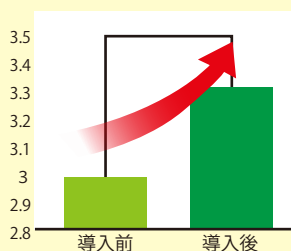


④ 浮腫の改善

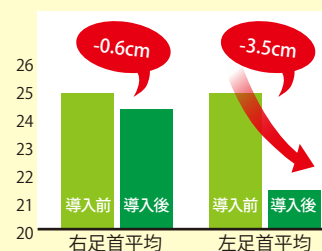

高齢者施設での2週間のモニター評価 アイ・ソネックス(株) 調べ 調査数：①②③ 26名 ④ 4名

睡眠改善の理由

頸部を支えるヘッドサポート、肩や上肢を支えるサイドサポートの機能により、胸郭がひろがり、眠りに必要な深い呼吸へと導きます。下肢を支え踵を除圧するアンカーサポートにより、下肢の浮腫を改善し、下肢の疲労感を軽減します。

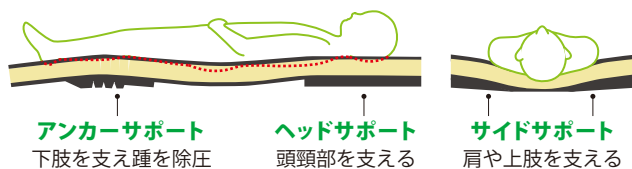

おすすめ対象者

睡眠改善

- ・なかなか寝付けない
- ・寝付いてもすぐ目を覚まして介護者を起こす
- ・夜になると大声を出して騒ぐ

安楽さ

- ・呼吸器疾患や心疾患で、息苦しくて眠れない

浮腫・疼痛

- ・腰痛がある
- ・足がむくんで、だるい

ムレ対策

- ・沈み込むマットレスでは、蒸れて困っている


姿勢管理

- ・ベッドの背上げ機能を使ってベッド上に座るが、滑ってしまって 上手く座れない


もちろん、床ずれ防止にも！

接触面が拡大して
体圧を分散！

一般的な静止型マットレス

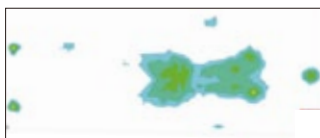

ナーセントコンタ

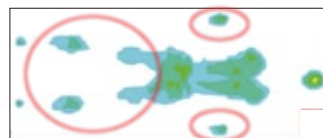

身長 174cm 体重 64kg 普通/BMI:21.1

110 94 77 60 44 27 10 mmHg


よくあるご質問

Question

1

「ねすわりガイド」の位置からずれたら、
座り直しが必要？

股関節（骨盤部）が、ねすわりガイドの▽マークに入ると最適な寝位置ですが、ねすわりガイドの幅におしり全体がだいたい収まっていれば、問題はありません。

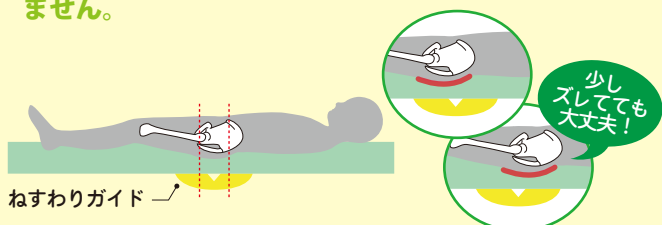


Question

2

デコボコしていて、端坐位が不安定になりそう…

マットレスの端は、しっかり太腿を支える硬めのブロックになっています。また、ベッド中央部のフラットエリアに座っていただくことで、安定した端坐位が可能です。

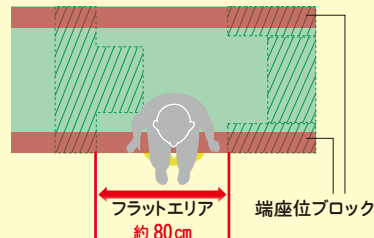


Question

3

ベッドの手すりは、どんなのが良い？

ロングタイプの手すりは、ねすわりガイドの一部と重なって座りにくいため、レギュラーサイズまたは、可動性のある介助バーなどをおすすめします。

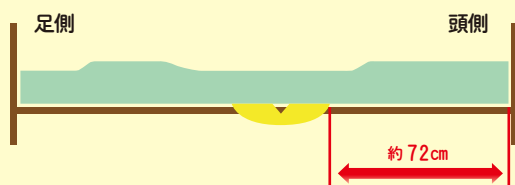

Question

4

- ・仰向けに寝ると楽なのは良いが、側臥位での姿勢や、寝返りは難しくない？
- ・デコボコした形状が、移乗や起き上がりなどの介助の邪魔をしませんか？


モニター試験によると、移乗や起き上がり、体位交換の介助負担感、ご利用者の側臥位姿勢について、「いままでのマットレスとの差はない」との評価結果になっており、デコボコした形状を気にすることなく、普段のマットレスと同じようにご利用いただけます。

Question

5

ポジショニングは、しなくていい？


ご利用される方の体型や関節拘縮などの重症度によっては必要になります。クッション数を減らせる場合もあるので、リハビリテーションスタッフなど専門家にご相談ください。

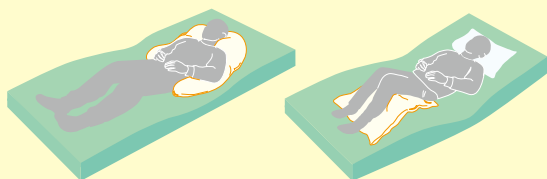

Question

6

ウレタン素材なので、蒸れませんか？

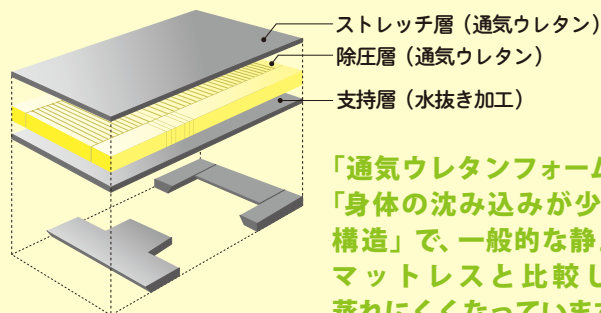

「通気ウレタンフォーム」+「身体の沈み込みが少ない構造」で、一般的な静止型マットレスと比較して、蒸れにくくなっています。

アイ・ソネックス株式会社

〒702-8004 岡山県岡山市中区江並100-7

TEL:086-200-1550 FAX:086-200-1553

<https://www.nasent.net>

ナースント 検索

