

車椅子ブレーキ延長棒



エンデバー (延べ棒)

車椅子ブレーキを使いやすくおしゃれに延長！
《抜き差しは簡単！》



色・柄 / 茶・木目



色・柄 / 赤・花柄

各1本 5,200円(税別)

 株式会社 **ハーツエイコー**

<http://www.hearts-eiko.co.jp>

取扱説明書

車椅子ブレーキ延長棒

ご使用になる前に説明書を読み、
大切に保管してください。

ご使用前に

⚠ 注意

- 調節ボタンが完全に穴から出ていることをご確認ください。

修理全般について

万が一、使用中に修理が必要になった場合には、お買い求めの販売店にご相談ください。

ご使用上の注意

⚠ 警告

- ご使用前に各部を点検してください。
- 延長棒は左右兼用型です。
- 異常があるときは直ぐに使用をやめ、お買い求めの販売店にご相談ください。
- ブレーキレバーの形状により取り付け出来ない場合があります。
- ブレーキレバーの形状が変わる事によるかけずれにご注意ください。
- 使用目的以外では使わないでください。
- 移動時等に支障がある時は取り外してください。
- 車椅子メーカー純正品ではないため、ご使用に関しては自己責任となります。また、取付けた状態で事故や車椅子の変形・故障があった場合、車椅子メーカーの保証対象外となります。
- 取付時、長さ調整は駐車用ブレーキを確実にかけ、平坦な場所で行い、長さ調整は介助者あるいは介助者立会いのもと行われますようお願い申し上げます。
- 取付後、介助者立会いのもとブレーキが確実にかかるかの確認を行い、車椅子使用者が自走する場合等に、本品が運転の妨げにならないか確認をお願い致します。
- 本品を分解しないで下さい。
- この取扱説明書は大切に保管をお願い致します。
- 車椅子の故障の原因になるため、車椅子を折りたたむ際は必ず本品を外して下さい。
- 乗り降りの際に本品に体重をかけないようにしてください。

株式会社ハーツエイコー

〒226-0026

神奈川県横浜市緑区長津田町 3179 番地


TEL.045-984-1882

FAX.045-984-0616

<http://www.hearts-eiko.co.jp>

MADE IN JAPAN

● 車椅子ブレーキ延長棒の各部の名称

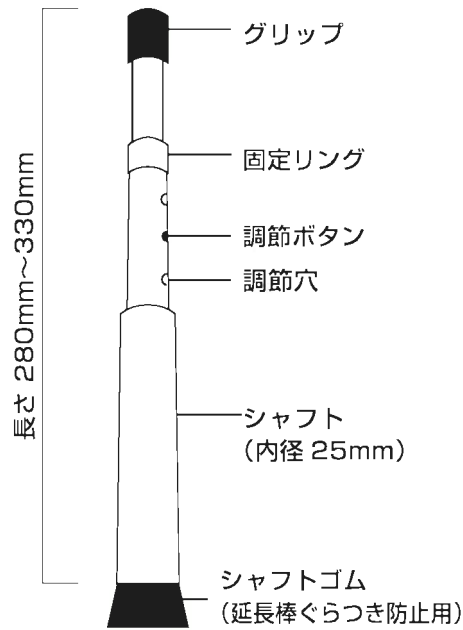

長さの調節

- ① 固定リングを緩めます
- ② 調節ボタンを押し、長さを調節します
- ③ 調節ボタンが安全に穴から出ていることを確認
- ④ 固定リングを締めます



固定リングの下にプラスチックの緩衝材があります。調節の際に外れることがありますので、ご注意ください。

装着方法

- ① シャフトゴムに切り込みが入っていますので、車椅子のブレーキレバーに差し込みます。
- ②
- ③ 延長棒をシャフトゴムに差し込む

※延長棒のシャフトの内径は 25mm です。
車椅子のブレーキレバーのにぎりゴムの太さが
25mm 以上のものには使用できません。

取扱店