

しっかり洗い流してスッキリ爽快

# 鼻用洗浄器

クリーンリフレッシュ

280 ml  
タンク容量  
280ml

ノズルが  
360°回転

替え  
ノズル付

USB  
充電式

鼻の奥まで  
しっかり洗浄

選べる3つの  
洗浄モード

ボタンを押すだけ  
かんたん操作

シリコンヘッドで  
鼻にやさしい

## 使い方


### 洗浄水を作る

精製水 280ml

精製塩約2.5g



+

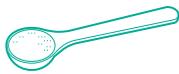

### モードを選択

normal

○ … 強い水流でしっかり洗浄

soft

○ … 柔らかい水流で  
初心者や子供におすすめ

pulse

○ … 水に脈動を与えながら洗浄

### 鼻腔を洗浄

洗浄中にも  
モード変更  
可能



販売名 鼻用洗浄器HK-200  
 一般的名称 鼻用洗浄器  
 品番 HK-200  
 医療機器区分 一般医療機器  
 医療機器届出番号 11B2X10023000003  
 入力 DC5V 1A  
 内蔵電池 充電式リチウムイオン電池 3.7V 1400mAh

充電時間 約4時間(空の状態から満充電まで)  
 寸法 約幅72×奥行85×高さ218mm  
 質量 約245g(本体+タンク)  
 流量 normal : 130±30ml/30秒  
 soft : 90±30ml/30秒  
 pulse : 100±30ml/30秒  
 タンク容量 約280ml

使用環境温湿度 温度: 5~40℃  
 湿度: 30~90%RH 結露なきこと  
 輸送および保管環境温湿度 温度: -10~60℃  
 湿度: 30~90%RH 結露なきこと  
 防水仕様 IPX7 ※1  
 動作回数 満充電で約28回 ※2  
 付属品 ノズル2個、ノズルヘッド2個  
 充電用ケーブル1本、計量スプーン1個

※ 製品の仕様は改良などのため、予告なく変更することがありますのでご了承ください。  
 ※ 7才未満の子供には使用しないでください。事故やけがのおそれがあります。

※1 IPX7とは、常温で水道水、静水の水深1mの水槽に本製品を静かに沈めた状態で約30分間水底に放置しても本体内部に浸水せず、製品の性能を保つことです。  
 ※2 1回2分、normalモードでの使用の場合

製造販売元 株式会社ドリテック 〒343-0824 埼玉県越谷市流通団地 2-3-9

