


TORAY

東レ独自の**3層構造**がスライド性アップ!
体位変換・移動もスムーズ&ラクラク!

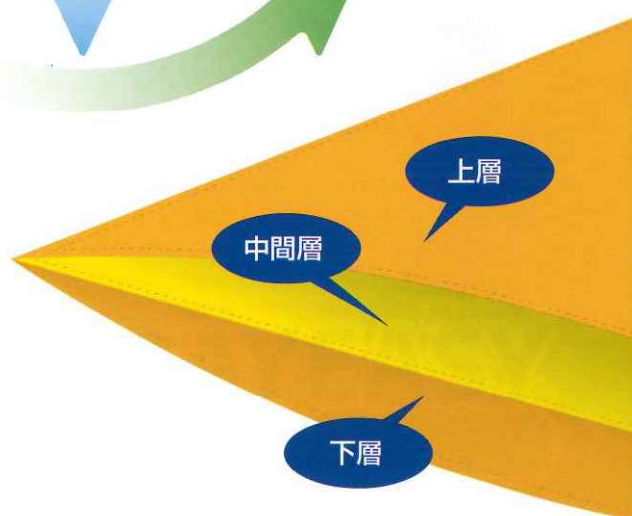

る!
快適スライドシート!



トレイジー
TORAYEASY®
スライドシート

わずかな力で体位変換・移動が楽にでき 介護する方・される方の負担を軽減する

東レ独自の3層構造による抜群のスライド性！

滑りのよいナイロン生地を3重にした、東レ独自の3層構造により、抜群のスライド性を実現。上下左右、回転等、さまざまな体位変換や移動をわずかな力で楽に行えます。

軽くて薄いから携帯にも便利！


シート本体が薄く、軽量なため、コンパクトに折りたため、場所をとりません。付属の収納袋に入れることで持ち運びにも便利です。

制菌加工で清潔&快適！

東レの制菌加工素材「マックスベック®」を使用することにより、細菌の増殖を抑え、快適な環境を保ちます。

小さな力でスムーズに 移動できるのは、なぜ？

シート本体の素材が滑りのよいナイロンであることに加え、3層構造の中間層が上下層の動きに干渉されないため、上下左右、回転等のさまざまな動作もわずかな力で可能にします。また、体位変換や移動時にできる上下層の生地のねじれやシワも中間層の自由な動きによって低減。生地のためりや引っかかりがなくなり、スムーズな動きを実現します。

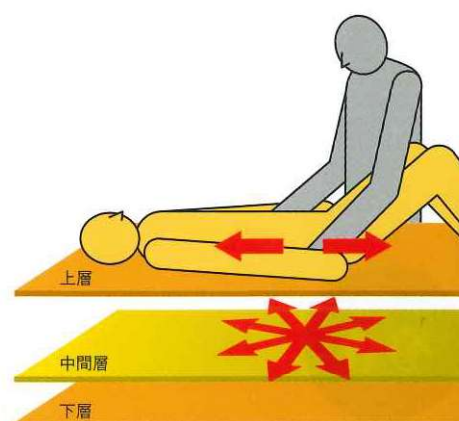

TORAYEASY®を二つ折りにして、頭部側から体の下へ差し込みます。
どなたでも簡単にできますが、とても良く滑りますので、寝ている方の頭
がベッドにぶつからないように、ゆっくりと**身体を動かしてください**。

ご紹介の方法以外にも、アイデアと工夫でより簡単に、より楽にご使用いただけます。
ご利用者に合わせて安全にご配慮のうえ、ご使用ください。



肩の下まで入ったら、二つ折りにした
下側（ベッド接地面）のスライドシー
トを引張ります。



次に、腰部の下まで引張ります。



寝ている方の体を片手で軽く押さえ、
もう一方の手でスライドシートを**3枚
一度につかみ**素早く引き抜いてくだ
さい。



ご使用後は、必ずス
ライドシートの専用
ケースに収納して
ください。



●TORAYEASY®のご使用方法・その1

上から差し込んで体位移動する場合 (二つ折りにして使用)



1
スライドシートを前後15cmほど差をつけて、二つ折りにします。



2
折り目部分を持ち、頭部側から枕の下へ差し込みます。



5
スライドシートの端が出てくるまで、きちんと伸ばします。



6
寝ている方の足元を右手で軽く押さえ、左手で膝を押すように動かすと簡単に体位移動ができます。(左右の体位移動は6ページの6をご参照ください)

TORAYEASY®をジャバラ状に折り、体の脇から体の下へ差し込みます。
寝ている方の体を片手で軽く支えながら、もう一方の手で素早く広げていくのがポイントです。

ご紹介の方法以外にも、アイデアと工夫でより簡単に、より楽にご使用いただけます。
ご利用者に合わせて安全にご配慮のうえ、ご使用ください。



体を横に向かせ、スライドシートをさ
らに体の下へ広げていきます。



体を手前側に向かせ、背部からスラ
イドシートを引き出し、広げます。



寝ている方の体を片手で軽く押さえ、
もう一方の手でスライドシートを素早
く引き抜いてください。



ご使用後は、必ずス
ライドシートの専用
ケースに収納して
ください。



●TORAYEASY®のご使用方法・その2

側面から差し込んで体位移動する場合 (ジャバラ折りにして使用)



スライドシートの長辺を持ちます。



寝ている方の体の横にジャバラ状に折ったスライドシートを置き、左手で軽く体を起こしながら、スライドシートを体の下へ差し込みます。



敷き込み完了。



寝ている方の肩と腰に手を当て、軽く手前へ引くように身体を動かせば、簡単に左右への体位移動ができます。(上下の体位移動は4ページの⑥をご参照ください)



製品仕様



オレンジ



ラベンダー

素 材	シート地	ナイロン100%	制菌加工「マックスベック®」使用
	収納袋	ポリエステル100%	
サイズ	シート地:120×75cm 収納袋:19.5×29cm		
価 格	メーカー希望小売価格 9,500円(税別)		10,450円(税込)

お手入れ方法



※乾燥機のご使用は、お避けください。

安全にご使用いただくために



警告

誤った取り扱いをすると、人が死亡や重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。

●本製品はベッド・寝具の上での**体位変換・移動のみに使用**し、それ以外の場所では使用しないで下さい。例えばベッドから車椅子への**移乗等には使用しないで下さい**。また、使用後は速やかに抜き取り、付属の収納袋に収納し、フック等に掛けて保管して下さい。



注意

誤った取り扱いをすると、人が重傷を負う可能性、または物的損害の発生が想定される内容を示しています。

●本製品は滑りやすいので、**取扱いには十分ご注意下さい**。●**通路・床・お子様の手の届く場所に放置しないで下さい**。誤って踏んだ場合、滑って転倒したりケガをする恐れがあります。●ゆっくり滑らせてご使用下さい。

■製造元

東レ株式会社 機能製品事業部



このパンフレットは、環境にやさしい
東レ「水なし平版」を使用しています。