

# HAND GRIP

ハンドグリップ

Designed with  
.rest  
.HoneycombCORE

## 開放ハニカム構造の通気性の高さを活かして 蒸れやニオイを抑えて、長時間快適に使える

「ネオテックス・ナーシングケア ハンドグリップ」は、従来の粒状クッション材とは異なる開放ハニカム構造の高性能エラストマーゲル [ .rest. ハニカムコア ] を断裁加工したピースを採用しています。クッション材の漏れ、こぼれの恐れがなく、通気性にも優れるため、手のひらの蒸れやニオイを抑えて長時間快適に使用することができます。本体カバーとハンドルは共に肌触りが良く手に優しいコットン素材で、汚れたらそのまま丸洗いが可能です。




### 商品特長

- 断裁加工した熱可塑性エラストマーゲル [ .rest. ハニカムコア ] を  
コットン素材のハンドル付きカバーに充填した、手指の拘縮緩和のためのハンドグリップ
- 通気性の良い開放ハニカム構造により、手のひらの蒸れ・ニオイを抑えて長時間快適に使用できる
- 粒状クッションとは異なり、内容物の漏れ、こぼれなどが気にならない
- 本体カバーとハンドルは、肌触りが良く手に優しいコットン素材
- 汚れたらカバーごと丸洗いが可能\*

\*水洗い可能。高温消毒や、タンブル乾燥器の使用は不可。

断裁 .rest. ハニカムコアピースを  
グリップ型カバーに充填

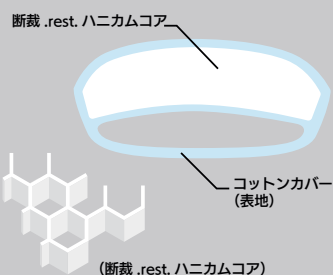

握りやすく、蒸れにくい



カバーごと洗えて簡単・清潔



### 使用上のご注意

手指拘縮の進んだ患者様へのハンドグリップ適応には医療従事者の指導の下、無理せずゆっくり、少しづつ、優しく指を開き、握ってもらうようご留意ください(無理をすると、手指の骨折など招く恐れがあります)。またご使用中に異常が発生した際、あるいは誤って [ .rest. ハニカムコア ] 裁断片を噛み切った場合には、直ちに医療従事者にご相談ください。

アルコール消毒や塩素系薬剤での消毒は可能ですが、カバーの変色の危険もありますので、予め目立たない部分で確認の上消毒ください。

### 製品仕様

品番	NXG-0010
本体サイズ	直径 約 4 長さ 約 12 [cm]
質量	約 60 [g]
素材	中材：断裁 .rest. ハニカムコア(熱可塑性エラストマー) / カバー：綿(外カバー)、ポリエステル(内カバー)
原産国	日本
JANコード	4580372289013
価格	2,650 円 *消費税別



Designed with  
.HoneycombCORE

.rest [ドットレスト] とは、ヘルスケア・アウトドア・オフィスワーク・スポーツなど様々なシーンにおける、「レスト(休息)」の質を向上させる機能性マテリアルです。[ .rest. ハニカムコア ] は除圧性・通気性・耐久性等に優れた、開放ハニカム構造のスチレン系エラストマー緩衝材です。([立体格子状エラストマー成型体]特許第 6890832 号)

製造販売元 株式会社 ネオテックス

〒910-0844 福井市長本町 804-1 TEL: 0776-54-1830 E-mail: nxinfo@neotex.biz