


貸与

介護保険
公益財団法人テクノエイド協会 T A I S 認定

特許申請中

ふくよく 床置き式手すり 水回りにもってこい[®]

製品仕様

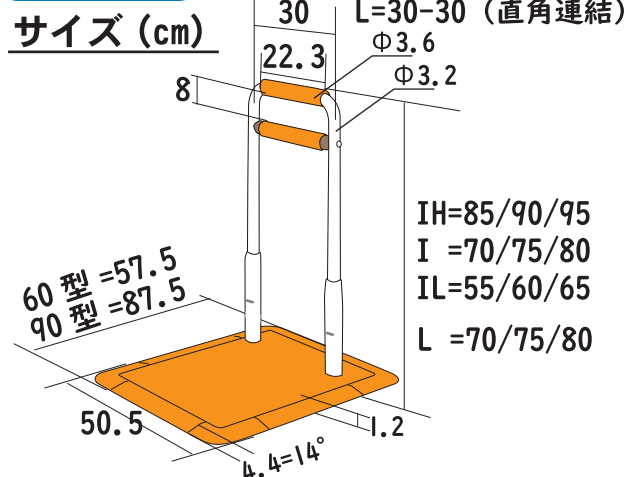


耐荷重（共通） 100Kg

材質（共通） 塩素系洗剤が使える素材

ステンレス（SUS304）	手すり芯材、支柱、ベースプレート 突っ張り棒本体・Cクリップピン 全ネジ類 ※支柱は粉体焼き付け塗装
合成ゴム	ベースプレート周辺ゴムスロープ 滑り止めゴムマット、巻き付けゴム
樹脂	手すり被服（PVC） 手すり接合部・面ファスナー（Ny） 突っ張り棒Cクリップ（PP）

品番の意味

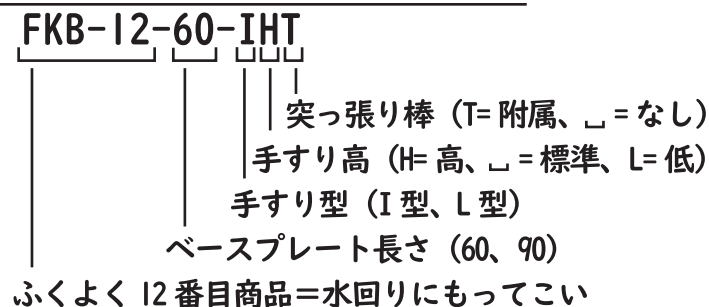

※製品の仕様や材質、外観、価格など予告なく変更する場合があります

重量（Kg）

60-I	13.8	90-I	18.5
60-IH	14.2	90-IH	18.9
60-IL	13.4	90-IL	18.1
60-L	16.3	90-L	21.0
60-IT	14.3	90-IT	19.0
60-IHT	14.7	90-IHT	19.4
60-ILT	13.9	90-ILT	18.6
60-LT	16.8	90-LT	21.5

TAIS/ 価格

品番	TAIS	価格
60-I	01255-000013	147,840円 税抜 134,400円
60-IH	01255-000022	150,150円 税抜 136,500円
60-IL	01255-000024	147,840円 税抜 134,400円
60-L	01255-000015	182,490円 税抜 165,900円
60-IT	01255-000017	163,432円 税抜 148,575円
60-IHT	01255-000026	165,742円 税抜 150,675円
60-ILT	01255-000028	163,432円 税抜 148,575円
60-LT	01255-000019	198,082円 税抜 180,075円

品番	TAIS	価格
90-I	01255-000014	157,080円 税抜 142,800円
90-IH	01255-000023	159,390円 税抜 144,900円
90-IL	01255-000025	157,080円 税抜 142,800円
90-L	01255-000016	191,730円 税抜 174,300円
90-IT	01255-000018	172,672円 税抜 156,975円
90-IHT	01255-000027	174,982円 税抜 159,075円
90-ILT	01255-000029	172,672円 税抜 156,975円
90-LT	01255-000020	207,322円 税抜 188,475円

ふくよく 縁でも壁でも突っ張り棒（1本）
1本あたり 7,796円 税抜 7,088円



製造元 有限会社 サテライト

〒659-0075 兵庫県芦屋市津知町 14-15
木ノ下ビル 2 階
Tel 0797-24-9015 FAX 0797-24-9012

お問い合わせ

ふくよく 床置き式手すり 水回りにもってこい[®]

公益財団法人
テクノエイド協会 T A I S 登録

介護保険
貸与



選定理由



キッチンシンクと同種ステンレス
カビキラーが使える
床・裏面も乾かせる

生活継続の意向尊重できる
転倒不安による精神的負担を軽減できる
住宅改修が難しいから 強力洗剤・漂白剤を使いたいから
バスグリップが使えないから 握れない、立位安定しないから



床・裏が乾かせます

2種類のベースプレート × 4種類の手すり × 突っ張り棒の有無 2 = 全 16 の組み合わせ



60-I

高さ 70/75/80cm
ベースプレート長さ約 57.8cm
狭い場所で
立位安定・転倒予防



90-I

高さ 70/75/80cm
ベースプレート長さ約 87.8cm
広い場所で
より安定させたい



60-L

高さ 70/75/80cm
直角 2 方向での
安定性



60-IL


高さ 55/60/65cm
深堀の浴槽横
円背・いざり等



60-IHT

高さ 85/90/95cm
直置き浴槽横
突っ張り棒付き

使用例

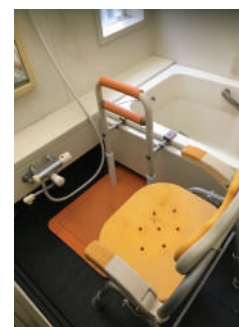

洗い場、脱衣所、キッチン、洗面所、トイレ、ベッドサイド、椅子、玄関など

有限会社 サテライト

錆びにくい・滑りにくい・水はけ良好


ふくよく 床置き式手すり水回りにもってこい[®]

介護保険
公益財団法人テクノエイド協会 T A I S 認定

貸与



高さ 95cm 直置き浴槽横 ※踏み台は付属していません

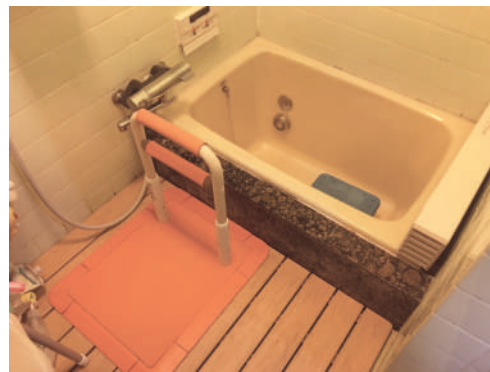

高さ 55cm 深埋め浴槽横



高さ 75cm 住宅改修不可浴室

水回り適合

水回りに適した特徴



ベースプレート裏側


錆びにくい キッチンシンク同種防錆ステンレス SUS304

SUS304
※磁石がつかない
種別ステンレス

ベースプレート

手すり芯材
支柱
全てのネジ

全ての金属
SUS304使用

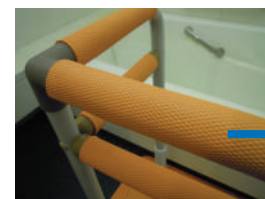

手すり把持部

滑りにくい 定評シンエイテクノ社「ダイヤタッチ」ゴム

握り込まないでも滑りにくい


滑らないゴム
ダイヤタッチ

濡れた足でも滑りにくい

つまづきにくい
シャワーキャリーOK

全周
ミニスロープ

幅広ゴムで
本体も
滑りにくい

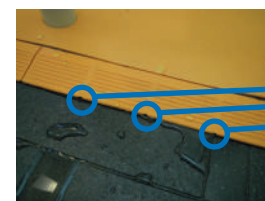

ベースプレート周辺

水はけ良好 排水口の上に設置可能

水はけ
トンネル

水が抜ける周辺ゴム裏側

水が溜まらない
分割式

水抜き孔

水はけトンネル

利用者像

手すりを諦めていた方にも

賃貸部屋、壁がもろい・配管があるなどで手すりをつけられない
住宅改修の予算枠を使い切っている
浴室内導線が壁方向とは違う（例：片麻痺の方＝往路復路異なる）
脱衣所は洗濯機などがあり、手すり設置場所がない
進行性病状の方で、固定型手すりは陳腐化する
福浴 回転バスタブ座面など着座入浴で、より安定して使いたい
リウマチ・低握力などで手すりを握り込めない（把持部のゴムで安定）
ポータブルでこぼした排泄物臭を消したい（カビキラー等で洗える）
キッチンで体幹安定させたい（滑らない、もたれられる）



お手入れ

洗い方・乾かし方まで考えた手すり

ネジを外したり、持ち上げないで洗えます 乾かせます



全周はゴムに覆われているので
床面を傷つけずに立てかけOK


裏面も床面も洗え、乾かせる



傾けて洗浄




ゴムマットを掛けて乾かすのもOK

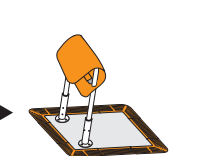

カビキラー 使えます 原液 8 時間浸漬試験 硬度変化・色落ちなし

【確認済み洗剤一覧】

- | | | |
|--------|---------------|------------|
| ✓カビキラー | ✓カビキラー除菌キッチン用 | OK |
| ✓ハイター | ✓キッチンハイター | ✓キッチン泡ハイター |
| ✓クエン酸 | ✓重曹せっけん | ✓強力カビハイター |
| ✓マイペット | ✓お風呂の洗剤 | ✓カビ取り剤 |

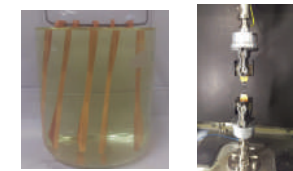


兵庫県立工業技術センター JIS 試験

※洗浄剤の注意書きを遵守してください。※花王・SEKISUI・ジョンソンなど製造各社の登録商標

分割型の部品交換

支柱・手すり本体・ベースプレート
滑り止めゴム（手すり巻き付け・足元マット）
ベースプレート周辺のミニスロープ状ゴム
固定ネジ・緩み止めネジ・各種資材

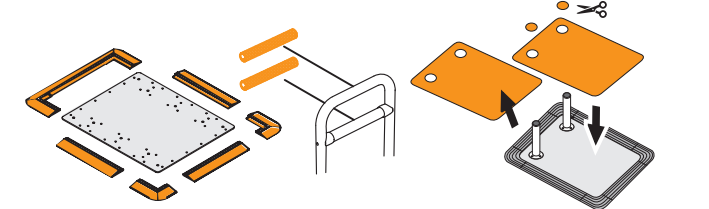

よくあるご質問

十分な耐久性 多場面

Q1「貸与？」

厚生労働大臣の解釈通知で「床置き式手すりは居室内で使う」で、浴室を除くなどの記載はなし。公益財団法人テクノエイド協会ホームページ上でも貸与マーク（詳細説明に洗い場で使用と記載）。バスリフトは貸与品としての前例です。

Q2「浴槽内？」

基本は避けてください。重量物である本体を出し入れする際に浴槽破損や介助者の腰痛発生などがあります。

Q3「温泉で？」

保証はできかねます。硫黄他様々な成分や強酸性・強アルカリ性の湯などもあり、耐久試験の範囲を超える事例もあります。

Q4「乗らないで使うと？」

オプション「縁でも壁でも突っ張り棒」使用検討ください。弊社品に限らず床置き式手すりはベースプレートに乗って使用するのが基本となります。

Q5「水勾配？」

付属の高さ微調整用ゴムで水平を保ってください。急な勾配では、すのこ等で床の水平を確保ください。

Q6「外では？」

ご使用いただけます。直射日光が当たる場所では、ゴムの劣化が早まると考えられますのでご注意ください。

Q7「耐久性は？」

JIS 規格過重試験合格（750N 繰り返し負荷 2 万回など）
紫外線室内 5 年分照射ゴム疲労試験合格
JIS 規格耐薬品性試験合格（洗剤漂白剤等 8 時間浸漬）

Q8「注意点は？」

壁、洗面台、ベッドなどの家具と本品との間に挟まれないよう設置に十分な間隔をあけるか密着ください。その他含め、詳細はマニュアルをご覧ください。