



スウェーデンより登場!!

Flowboard Oval

フローボード オーバル



フローボードオーバルXSサイズ

フローボードオーバルMサイズ

特徴

- フローボードオーバルは2枚1組で使用します。
- 適度にしなり、楕円形で滑らかな表面です。容易にセットして、引き抜くことができます。
- ポリエチレン素材で、お手入れは洗剤や消毒液で清拭できます。
- 介護保険：福祉用具貸与(特殊寝台付属品)の製品です。

使用例



■ 寝位置の補正



■ 座奥への座り直し



■ 仰臥位姿勢でスリングシート装着の補助



■ 座位姿勢でスリングシート装着の補助

こちらから、詳しい使用説明動画をご覧になれます。



寝位置の補正

足と足底に力が込められる軽度被介助者は、ご自分の力でベッド上方へ移動できます。



被介助者の左右両側から1枚ずつ体幹に対して平行に差し込みます。



被介助者自身が両膝を曲げて足底を踏ん張り、ベッド上方へ伸びあがるようにして上方へ移動します



- ① エアマットレスとの組み合わせにも適しています。
- ② 介助者が被介助者の足底を固定し、体幹部分をフローボードオーバルの上で移乗します。

座奥への座り直し

座位姿勢の座り直しを補助します。



■ 軽度被介助者の場合



被介助者の足を車いすのフットレスト等に乗せ、大腿部を座面から浮かせます。



被介助者の両足大腿の下にフローボードオーバルXSサイズ1枚をそれぞれ差し込みます。



被介助者は前傾姿勢を取り、車いすのアームサポートをつかみながら車いすの座面の奥に向けて臀部をスライドします。

■ 重度被介助者の場合



被介助者を前傾姿勢にします。大腿部の下にフローボードオーバルXSサイズ1枚を、それぞれ差し込みます。



被介助者の膝を押して、車いすの座面の奥に向けてポジショニングを行います。



フローボードオーバルXSサイズを外側より引き抜きます。

スリングシートの装置の補助

被介助者の姿勢を変えることなく、スリングシートの装着ができます。



■ 仰臥位姿勢の場合

フローボードオーバルMサイズを使用



フローボードオーバルMサイズ2枚を被介助者の左右両側から1枚ずつ体幹に対して平行に差し込みます。



スリングシートの足側から被介助者の尾骨の位置まで引き込みます。



スリングシートの中心が被介助者の体幹中央から外れないように注意します。

◎エアマットレスとの組み合わせにも適しています。

■ 座位姿勢の場合

フローボードオーバルMサイズとフローボードオーバルXSサイズを使用



フローボードオーバルMサイズ2枚を被介助者の背中と車いすの背もたれの間に差し込みます。



スリングシートの足側からフローボードオーバルMサイズ2枚の間に通し、中心が被介助者の背中と合うよう調整します。



スリングシートを引き下ろし被介助者の背後にセットします。



両足の大腿部の下にフローボードオーバルXSサイズを敷き込みます。



クッションとフローボードオーバルXSサイズの間にスリングシートを敷き込みます。



スリングシートの脚部を引き上げます。

< スペック表 > 介護保険：福祉用具貸与（特殊寝台付属品）

型番	品名	サイズ	色・素材	耐荷重	お手入れ	TAISコード	販売単位	定価（税抜き）
FBOXS	フローボードオーバル XSサイズ	45x20cm	ブラック・ポリエチレン	150kg	ぬるま湯または石鹸水で清拭。消毒が必要な場合は70%エタノールや45%イソプロパノールあるいはそれに近い消毒液を使用。	01624-000025	2枚/セット	34,000円
FBOM	フローボードオーバル Mサイズ	85x39cm	ブラック・ポリエチレン	150kg		01624-000026	2枚/セット	43,800円

※本品は医療機器ではありません。

※製品の色はカタログの色と多少異なる場合があります。※本製品は予告なく仕様を変更する場合があります。※本製品に関するお問い合わせは、販売店もしくはシーマン株式会社までご連絡ください。