

CM 関節固定バンド

主な用途：CM 関節症、腱鞘炎、関節リウマチ、
第 1 中手指関節の側方靱帯損傷など



ハンドフィット®CMドライ

着けやすい&乾きやすい

- 簡単に装着
- 速乾性に優れた素材採用
- 親指と手首をしっかり固定



▲商品詳細
はこちら




親指と手首を入れて
締めるだけ

水に濡れても
乾きやすい生地

親指ベルト②

親指ベルト①

左右各専用のため
しっかりとフィット

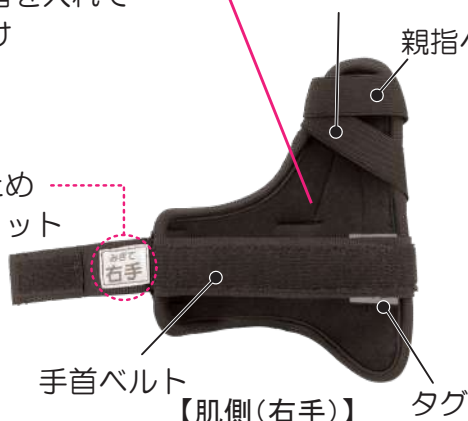

手首ベルト

【肌側(右手)】

タグ



【外側(右手)】

親指の位置を安定させる
樹脂ステーと親指ベルト

右手

素 材


ナイロン、ポリウレタン、EVA、ポリエステル、ポリエチレン

装着方法

例：右手



1 輪になっている手首ベルトに手を通し
親指ベルト①②両方に親指を通す

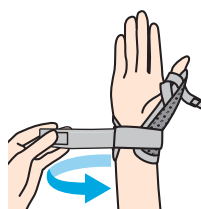

2 手首ベルトを引っ張り手首に巻き
面ファスナーを留める



3 親指ベルト①を引っ張り
面ファスナーを留める

※適度な固定になるよう
面ファスナーの位置を
調整してください

サイズの選び方

計測部位目安



規 格

定価：オープン

商品番号	規格	手首廻り	販売単位	JAN CODE	ケース単位
037908	右手 フリー	12cm ~ 26cm	1 枚	4958995379082	5 枚
037909	左手 フリー	12cm ~ 26cm	1 枚	4958995379099	5 枚

・ 1 枚入箱



竹虎のウルファァ® シリーズ(手部)

ソフトな素材で構成されているため、日常生活動作(ADL)を制限しません。

手首廻り
(共通)

フリー 12cm ~ 20cm

XL 16cm ~ 24cm

CM 関節固定バンド

※左右兼用



ソフラウルファァ® CM



- 色 ピンク※フリーのみ
ベージュ
ネイビー
- サイズ フリー、XL
- 価格 2,585 円(税込)
2,350 円(税別)

TFCC 固定バンド

※左右兼用



ソフラウルファァ® TFCC



- 色 ピンク※フリーのみ
ベージュ
ネイビー
- サイズ フリー、XL
- 価格 2,475 円(税込)
2,250 円(税別)

手関節固定バンド

※左右兼用



ソフラウルファァ® リスト



- 色 ピンク※フリーのみ
ベージュ
ネイビー
- サイズ フリー、XL
- 価格 1,210 円(税込)
1,100 円(税別)



株式会社 竹虎®

<https://www.taketora-web.com/>

【メディカル事業部】

東日本 〒231-0011 神奈川県横浜市中区太田町2-23 麻葉メディア・ビジネスセンター8F
TEL. 045 (680) 0308 (代) FAX. 045 (680) 0312
西日本 〒564-0052 大阪府吹田市広芝町10-35 江坂南口第二ビル5F
TEL. 06 (6386) 7217 (代) FAX. 06 (7175) 7101

取扱店